


INFLADO DE LA PRÓTESIS

Apriete la bomba **rápida y firmemente**, y suéltela para activarla. Continúe apretando y soltando la bomba alternativamente hasta que los cilindros se llenen de líquido y alcance la erección. La erección completa requiere apretar la bomba entre un mínimo de 10 y un máximo de 25 veces.

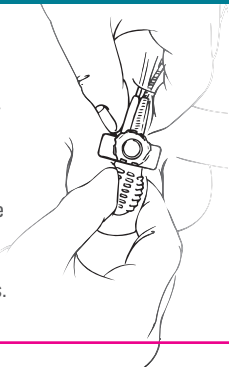

DESINFLADO DE LA PRÓTESIS

Localice el botón de desinflado.
Apriete el botón durante unos cuatro segundos y suéltelo.
Cuando los cilindros se hayan desinflado, puede ejercer presión sobre el pene para aumentar su flacidez.



UROPH-413710-AA JULIO2016 © 2018 Boston Scientific Corporation
o sus afiliados. Todos los derechos reservados. DINURO2229SA

**Boston
Scientific**